



Walker transporta soma – iepakojšanas instrukcijas


Walker transportēšanas soma sastāv no galvenās transportēšanas somas un mazākas uzglabāšanas/pārnēsāšanas somas. Transportēšanas soma ir piemērota visiem Walker modeļiem.

Der visiem Trionic Walker modeļiem.




① Atveriet galveno maisiņu

Atveriet uzglabāšanas maisa rāvējslēdzēju un izpakojiet galveno transportēšanas maisu.

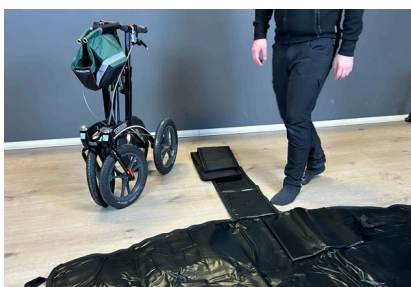


② Izklājiet galveno maisu.

Atveriet galvenās somas rāvējslēdzēja rāvējslēdzēju visā garumā un atlociet somas atlokus uz grīdas.

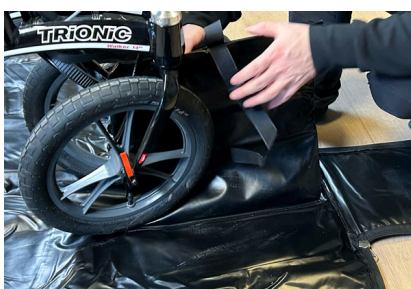

③ Novietojiet staigulīti uz somas.

Novietojiet Walker ratiņus galvenās transportēšanas somas vidējā daļā. Galvenajai somai ir integrēts polsterēts aizsargpārloks ar Velcro siksnu. Pavelciet polsterēto aizsargpārloku uz augšu un novietojiet to starp priekšējo riteņu dakšām, lai aizsargātu krāsojumu.

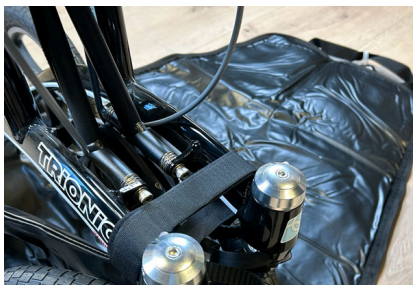

④ Nostipriniet salocīto rāmi ar integrēto Velcro siksnu.



⑤ Pārlokiet centrālo atloku pāri Walker.

⑥ Paceliet sānu atlokus un aizveriet galveno rāvējslēdzēju.

⑦ Šajā fotoattēlā redzams pareizi iepakots Walker.

Iepakošanas instrukcijas

***Noskenējiet QR kodu ar savu
viedtālruni vai citu ierīci, lai
skatītu video instrukcijas.***