




## Veloped wandelstokhouder – montage-instructie

2-delige stokhouder voor de Veloped die ook als veiligheidsriem fungeert wanneer de Veloped is opgevouwen voor transport of opslag. De stokhouder past op alle Veloped-modellen.

Scan de QR-code met uw smartphone of toestel om de video-instructies te bekijken.

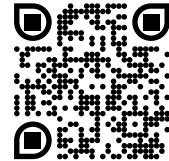

### ① Bevestig de achterste houder.

Klem de achterste houder om het bovenste deel van de achterste verticale framebuis, net onder de snelontkoppelaar voor de hoogteverstelling.



### ② Ziehen Sie das Band fest.

Trek de riem strak, wikkel hem om de buis en maak het met klittenband vast. Laat het overtollige stuk van de riem vrij hangen.



### ③ Pas de achterste lus aan.

De omvang van de achterste lus kan worden aangepast door de klittenbandsluiting los te maken. Mogelijk moet u een beetje in de lus knijpen om een ronde/ronde vorm te krijgen.



#### ④ Bevestig de voorste houder.

Wickeln Sie den vorderen Halter um das obere Rahmenrohr, direkt hinter der Korbschienenbefestigung. Achten Sie darauf, dass das Anti-Rutsch-Patch zum Rahmenrohr zeigt.



#### ⑤ Pas de voorste lus aan.

De omvang van de voorste lus kan worden aangepast door de klittenbandsluiting los te maken. Mogelijk moet u een beetje in de lus knijpen om een ronde/ronde vorm te krijgen.



#### ⑥ Bevestig de wandelstok.

Bevestig de wandelstok door deze vanaf de achterkant eerst door de achterste- en dan door de voorste houder te duwen.



#### ⑦ Bevestig het frame.

U kunt de riem voor de wandelstokhouder gebruiken om het frame vast te zetten wanneer het is opgevouwen, bij het transporteren of opbergen van uw Veloped.