



Handleiding: Trionic Kabelslot



① Zoek de schroef op de beugel.



② Draai de schroef los met een inbussleutel van 4 mm.



③ Trek het uiteinde van de band uit de beugel.



④ Wikkel de band om de verticale achterste framebuis van de Veloped (bij de Walker om de semi-verticale framebuis).




⑤ Plaats het uiteinde van de band in de beugel.



⑥ Draai de schroef/band met de 4 mm inbussleutel vast totdat de band strak zit.



⑦ Snijd het overtollige stuk van de band af met een kabelkniptang of mes.

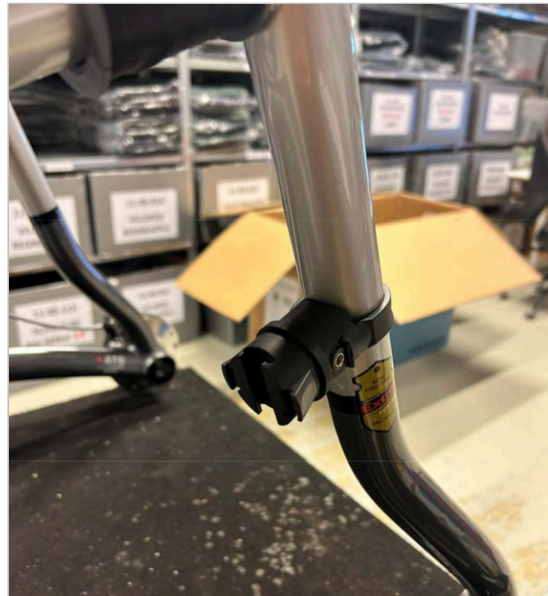

⑧ De foto toont de correcte bevestiging van de beugel.



⑨ Bevestig het kabelslot van bovenaf aan de beugel en druk het kabelslot naar beneden totdat het vastklikt in de beugel.



⑩ Om het kabelslot los te maken van de beugel, drukt u op de twee grijze knoppen en haalt u het slot uit de beugel.