

## **Flessenhouder met veloped-design – Montage-instructies**


Universele bidonhouder voor Veloped en rollator, die met een schroefklem aan het Veloped-frame wordt bevestigd. Kleur: zwart.

De levering omvat een bidonhouder, een klem en een inbusleutel van 3 mm.


Scan de QR-code met uw smartphone of toestel om de video-instructies te bekijken.



① Draai één schroef los en verwijder deze uit de klembevestiging.

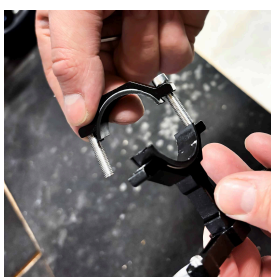

② Draai de andere schroef zo ver mogelijk los, maar laat deze aan de klem vastzitten.

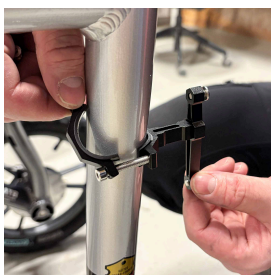

③ Draai de ene helft van de klem 90 graden om de klem gemakkelijker op het Veloped-frame te kunnen monteren. Bevestig de klem met de korte arm van de bidonhouder naar boven aan het verticale deel van de linker- of rechterachterbuis van het Veloped-frame. Zorg er bij het vastschroeven van de klem op het Veloped-frame voor dat beide schroeven gelijkmatig worden aangedraaid.



- ④ Draai de twee schroeven op de klembeugel los en schroef vervolgens de flessenhouder erop, bij voorkeur met de opening aan de zijkant van de flessenhouder naar buiten gericht.



- ⑤ De Veloped flessenhouders zijn nu correct gemonteerd en klaar voor gebruik. Goed gedaan.