




Wandelstokhouder – montage-instructies

Tweedelige wandelstokhouder die aan de handgreep en het frame van de Walker wordt bevestigd. Het bovenste deel heeft een slimme snelvergrendeling, waardoor de wandelstok snel kan worden bevestigd en verwijderd. Geschikt voor de rollators Walker 9er, 12er en 14er.

Scan de QR-code met uw smartphone of toestel om de video-instructies te bekijken.

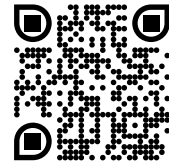

① Draai de bovenste houder zo dat het logo naar boven wijst.



② Klik de houder op het bovenste deel van de handgreepbuis.

Klik de houder op het bovenste deel van de handgreepbuis en schroef deze vervolgens vast met een kruiskopschroevendraaier.




③ Als u zowel de stokhouder als de rugleuning bevestigt

Opmerking: Pas de positie van de remhendel zo aan dat er ruimte is voor de bovenste stokhouder naast de rugleuning. Het kan nodig zijn de stokhouder ongeveer 30 graden naar buiten te kantelen om de stokhouder en de rugleuning op de rollator te laten passen.




④ Bevestig de onderste houder aan het frame

Voor montage aan de rechter-/linkerkant draait u de onderste houder zodat u de schroef vanaf de buitenkant van het frame kunt bereiken. Om de onderste houder aan het frame te bevestigen, wikkelt u de band om de framebuis en duwt u deze in het gat van de houder.

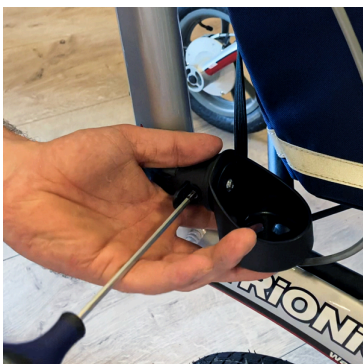

⑤ Draai de schroef/band vast

Draai de schroef/band vast met behulp van een inbussleutel van 4 mm.

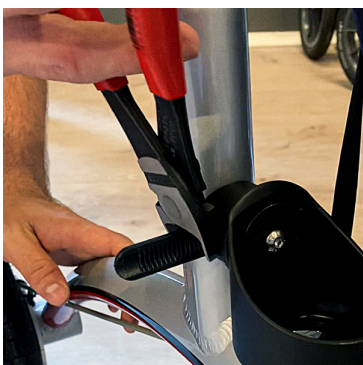

⑥ Knip de overtollige lengte van de band af

Knip het overtollige stuk van de band af met een kabelkniptang.



⑦ Klaar voor gebruik