



## Handleiding: Montage van de flessenhouder op de Walker 12er maat S




① Plaats van montage van de flessenhouder (R of L).



② Wikkel de riem om de framebuis en trek deze door de houder.



③ Trek de band strak en draai de moer met de klok mee om de band strakker te maken.

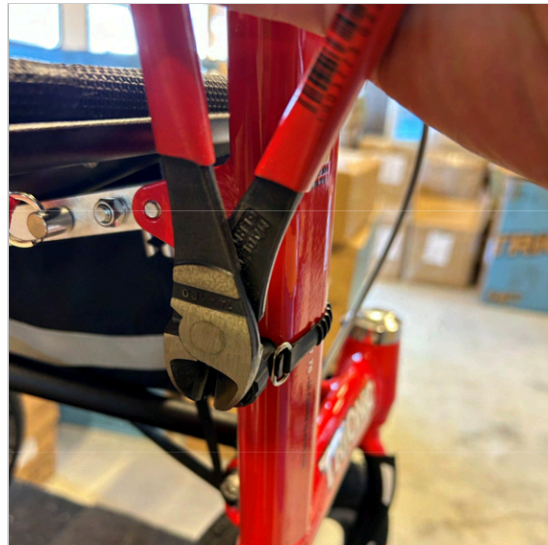

④ Knip het overtollige bandje af.



⑤ Monteer de tweede houder op dezelfde manier.



⑥ De twee houders zijn correct op de framebuis gemonteerd.



⑦ Bevestig de flessenhouder met de twee schroeven. De "opening" van de flessenhouder moet naar buiten wijzen.



⑧ De flessenhouder is nu aan het frame bevestigd, u kunt de fles vanaf de zijkant inbrengen en er naar buiten toe weer uithalen.