



Trionic Walker rugleuning – Montage instructies



De ergonomische en comfortabele rugleuning, gemaakt van waterafstotend en duurzaam 600D polyester, maakt de Walker 9er, 12er en 14er rollators compleet. Het biedt een comfortabele en veilige steun wanneer u zit. De lengte/diepte van de rugleuning is instelbaar.

Kies alstublieft de juiste lengte voor uw lichaam.

① Schroef los.

Verwijder de bouten en moeren van de twee klemmen.

② Bevestig de rugleuning.

Open de klemmen een klein beetje en maak ze vast aan de buizen. **LET OP:**Zorg ervoor dat het TRIONIC logo goed zit want de rugleuning heeft een hoek.



③ Helemaal naar boven.

Schuif de twee klemmen helemaal naar boven. Het is mogelijk dat je de schroeven op de remhendel een klein beetje moet losmaken om het zo wat naar achteren te kunnen schuiven.





④ maak de rugleuning vast.

Gebruik een 4 mm imbusleutel om de klemmen met de bouten en moeren weer vast te draaien. De banden van de rugleuning dienen bij de bestiging naar voren te wijzen.

⑤ Deze foto toont een juiste montage.



Voordat u de rollator uitvouwt.

Om de rollator op te vouwen, dient u de rugleuning een klein beetje te buigen.

Indien nodig.

Wanneer u van mening bent dat de rugleuning te lang/kort is, dan kunt u de lengte veranderen. Verwijder eerst de twee bouten en moeren en plaats de rugleuning daarna opnieuw op z'n plek.

