



Uchwyt na laskę w chodziku Veloped – instrukcja montażu

2-częściowy uchwyt na laskę w chodziku Veloped, który pełni również funkcję pasa bezpieczeństwa, gdy Veloped jest złożony do transportu lub przechowywania. Uchwyt na laskę pasuje do wszystkich modeli Veloped.

Zeskanuj kod QR za pomocą smartfona lub innego urządzenia, aby obejrzeć instrukcje wideo.

① Zamontuj tylny uchwyt.

Owiń tylny uchwyt wokół górnej części tylnej pionowej rury ramy, tuż pod szybkim zwalnianiem regulacji wysokości.

② Mocno naciągnij pasek.

Owiń pasek wokół rurki i przymocuj go za pomocą rzepu. Pozostaw nadmiar paska swobodnie zwisający.

③ Wyreguluj tylną pętlę.

Rozmiar tylnej pętli można dostosować, poluzowując zapięcie na rzep. Może być konieczne delikatne ściśnięcie pętli, aby uzyskać zaokrąglony/okrągły kształt.

④ Zamontuj przedni uchwyt.

Owiń przedni uchwyt wokół górnej rury ramy, tuż za mocowaniem szyny kosza. Upewnij się, że łatka antypoślizgowa jest skierowana w stronę rury ramy.

⑤ Wyreguluj przednią pętlę.

Rozmiar przedniej pętli można dostosować, poluzowując zapięcie na rzep. Może być konieczne delikatne ściśnięcie pętli, aby uzyskać zaokrąglony/okrągły kształt.

⑥ Przymocuj laskę.

Zamocuj laskę, wsuwając ją od tyłu, najpierw przez tylny, a następnie przez przedni uchwyt.

⑦ Zabezpiecz ramę.

Pasek mocujący laskę może być użyty do zabezpieczenia ramy po złożeniu, a także podczas transportu lub przechowywania Veloped.