



Instrukcja: Trionik Cable Lock



① Znajdź śrubę na wsporniku.



② Odkręć śrubę kluczem imbusowym 4 mm.



③ Wyciągnij koniec paska z uchwytu.



④ Owiń pasek wokół tylnej pionowej rury ramy Veloped (w modelu Walker jest to półpionowa rura ramy).



⑤ Włóż koniec paska do uchwytu.



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
⑥ Dokręć śrubę/pasek kluczem imbusowym 4 mm, aż pasek będzie dobrze napięty.




⑦ Odetnij nadmiar paska za pomocą obcinaka do kabli lub noża.



⑧ Zdjęcie przedstawia prawidłowe zamocowanie uchwytu.



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⑨ Przymocuj blokadę kablową do uchwyty od góry, dociśnij blokadę kablową w dół, aż zatrzaśnie się w uchwycie.



⑩ Aby odłączyć blokadę kablową od uchwyty, naciśnij dwa szare przyciski i wyjmij blokadę z uchwyty.