

Uchwyt na butelkę Veloped – instrukcja montażu


Uchwyt na butelkę Veloped i chodzik.
Uniwersalny uchwyt na butelkę, mocowany do
ramy Veloped za pomocą zacisku śrubowego.
Kolor: czarny.

W zestawie znajduje się uchwyt na butelkę,
zacisk mocujący i klucz imbusowy 3 mm.

Zeskanuj kod QR za pomocą smartfona
lub innego urządzenia, aby obejrzeć
instrukcje wideo.



① Odkręć i wyjmij jedną śrubę z mocowania zacisku.

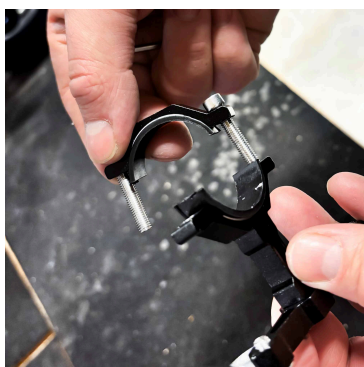

② Odkręć drugą śrubę tak daleko, jak to możliwe, ale pozostaw ją przymocowaną do zacisku.



③ Obróć jedną połowę zacisku o 90 stopni, aby łatwiej zamontować zacisk na ramie Veloped. Trzymając krótkie ramię uchwytu na bidon skierowane do góry, zamocuj zacisk do pionowej części prawej lub lewej tylnej rury ramy Veloped. Przykręcając zacisk do ramy Veloped, upewnij się, że obie śruby są dokręcone równo.



④ Odkręć dwie śruby na uchwycie zaciskowym, a następnie przykręć do niego uchwyt na butelkę, najlepiej tak, aby otwór boczny uchwytu na butelkę był skierowany na zewnątrz.



⑤ Uchwyt na butelkę Veloped jest teraz prawidłowo zamontowany i gotowy do użycia. Dobra robota.