




## Uchwyt na laskę – instrukcja montażu

2-częściowy uchwyt na laskę, który jest przymocowany do rączki i ramy Walkera. Górna część ma inteligentną funkcję szybkiego blokowania, a laskę można szybko przymocować i zdjąć. Pasuje do chodzików Walker 9er, 12er i 14er.

Zeskanuj kod QR za pomocą smartfona lub innego urządzenia, aby obejrzeć instrukcje wideo.

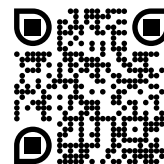

① Obróć górny uchwyt tak, aby logotyp był skierowany do góry.



② Zatrzaśnij uchwyt na górnej części rurki rączkojści.

Zatrzaśnij uchwyt na górnej części rurki rączkojści i przykręć go za pomocą śrubokręta krzyżakowego.



③ Jeśli zamontujesz uchwyt na laskę i oparcie

**Uwaga:** Dostosuj położenie dźwigni hamulca tak, aby było miejsce na górny uchwyt na laskę obok oparcia. Może być konieczne przechylenie uchwytu na laskę na zewnątrz, około 30 stopni, aby dopasować uchwyt na laskę i oparcie do Walkera.




#### ④ Przymocuj dolny uchwyt do ramy

W przypadku montażu z prawej/lewej strony, obróć dolny uchwyt, aby móc dosięgnąć śruby od zewnątrz ramy. Aby przymocować dolny uchwyt do ramy, owiń pasek wokół rury ramy i wciśnij go do otworu uchwytu.



#### ⑤ Dokręć śrubę/pasek

Dokręć śrubę/pasek za pomocą klucza imbusowego 4 mm.

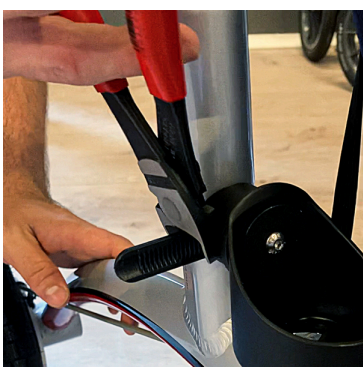

#### ⑥ Odetnij nadmiar paska

Odetnij nadmiar paska za pomocą obcinaka do kabli.



#### ⑦ Gotowy do użycia