



## Instrukcja montażu uchwytu na butelkę w Walker 12er rozmiar S




① Miejsce montażu uchwytu na butelkę (R lub L).



② Owiń pasek wokół rury ramy i przeciągnij go przez uchwyt.



③ Naciągnij pasek i przekręć nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby naciągnąć pasek.

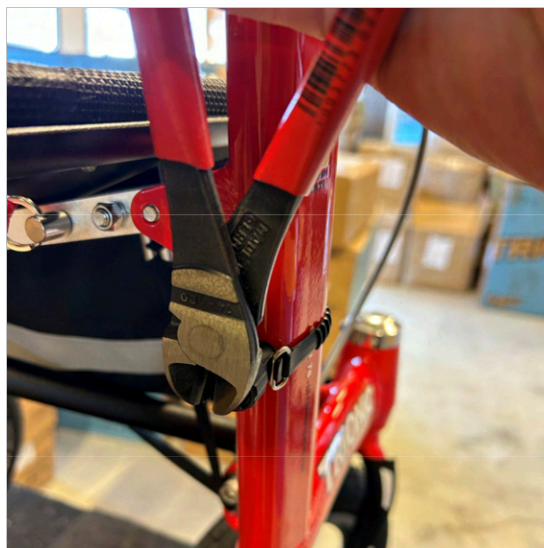

④ Odetnij nadmiar paska.



⑤ Zamontuj drugi uchwyt w ten sam sposób.



⑥ Oba uchwyty prawidłowo zamontowane na rurze ramy.



⑦ Przymocuj uchwyt na butelkę za pomocą dwóch śrub. „Otwór” uchwytu na butelkę powinien być skierowany na zewnątrz.



⑧ Uchwyt na butelkę jest teraz przymocowany do ramy. Butelkę wkłada się z boku i wyjmuje na zewnątrz.