



Oparcie do Trionic Walker – instrukcja montażu



Ergonomiczne i wyściełane oparcie wykonane z wodoodpornego i wytrzymałego poliestru 600D pasuje do chodzików rehabilitacyjnych Walker 9er, 12er i 14er. Zapewnia wygodne i bezpieczne wsparcie podczas siedzenia.

Długość/głębokość oparcia jest regulowana.

① Odkręć.

Odkręć śruby i nakrętki z obu zacisków.

② Zamontuj oparcie.

Otwórz lekko zaciski i przymocuj je do rurek rękojeści.

WAŻNE: Upewnij się, że logo „TRiONiC” jest prawidłowo ustawione, ponieważ oparcie jest ustawione pod kątem.



③ Aż do samego końca.

Przesuń oba zaciski do samej góry. Może być konieczne poluzowanie śruby na dźwigni hamulca, aby przesunąć ją nieco do tyłu.





④ zapnij oparcie.

Za pomocą klucza imbusowego 4 mm przymocuj oba zaciski śrubami i nakrętkami. Paski oparcia powinny być skierowane do przodu w punkcie mocowania.

⑤ Zdjęcie przedstawia prawidłowy montaż.



Przed rozłożeniem chodzika.

Aby rozłożyć chodzika, należy odchylić oparcie do góry.

W razie potrzeby.

Jeśli oparcie okaże się za krótkie/za długie, możesz dostosować długość. Odkręć dwie śruby i nakrętki, a następnie ponownie złoż oparcie.

