



## Oparcie do Trionic Walker – instrukcja montażu



Ergonomiczne i wyścielane oparcie wykonane z wodoodpornego i wytrzymałego poliestru 600D pasuje do chodzików rehabilitacyjnych Walker 9er, 12er i 14er. Zapewnia wygodne i bezpieczne wsparcie podczas siedzenia.

Długość/głębokość oparcia jest regulowana.

### ① Odkręć.

Odkręć śruby i nakrętki z obu zacisków.

---

### ② Zamontuj oparcie.

Otwórz lekko zaciski i przymocuj je do rurek rękojeści.

**WAŻNE:** Upewnij się, że logo „TRiONIC” jest prawidłowo ustawione, ponieważ oparcie jest ustawione pod kątem.

---

### ③ Aż do samego końca.

Przesuń oba zaciski do samej góry. Może być konieczne poluzowanie śruby na dźwigni hamulca, aby przesunąć ją nieco do tyłu.

**4) zapnij oparcie.**

Za pomocą klucza imbusowego 4 mm przymocuj oba zaciski śrubami i nakrętkami. Paski oparcia powinny być skierowane do przodu w punkcie mocowania.

---

**5) Zdjęcie przedstawia prawidłowy montaż.**

---

**Przed rozłożeniem chodzika.**

Aby rozłożyć chodzik, należy odchylić oparcie do góry.

---

**W razie potrzeby.**

Jeśli oparcie okaże się za krótkie/za długie, możesz dostosować długość. Odkręć dwie śruby i nakrętki, a następnie ponownie złóż oparcie.