



Instrukcja: Wymiana paska oparcia chodzika Trionic




- 1 Odkręć śrubę mocującą pasek za pomocą klucza imbusowego 3 mm.

Powtórz po drugiej stronie.



- 2 Pamiętaj o odzyskaniu śruby, nakrętki i tulei dystansowej.

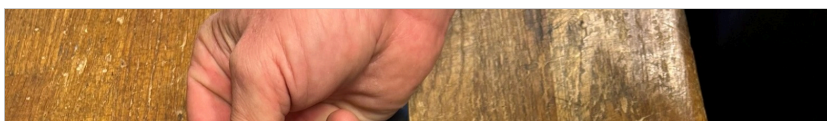



Instrukcja: Wymiana paska oparcia chodzika Trionic



- ⑤ Włóż nowy pasek wymienny do wyściółki.

WAŻNE: Upewnij się, że koniec paska jest wyrównany z logo TRIONIC, tak jak pokazano na zdjęciu.



- ⑥ Włóż rurkę dystansową do otworu na końcu paska.

