



Torba transportowa Walker – instrukcja pakowania


Torba transportowa Walker składa się z głównej torby transportowej i mniejszej torby do przechowywania lub noszenia. Torba transportowa pasuje do wszystkich modeli Walker.

Pasuje do wszystkich modeli Trionic Walker.




① Otwórz główną torbę

Rozpakuj torbę do przechowywania i wypakuj główną torbę transportową.

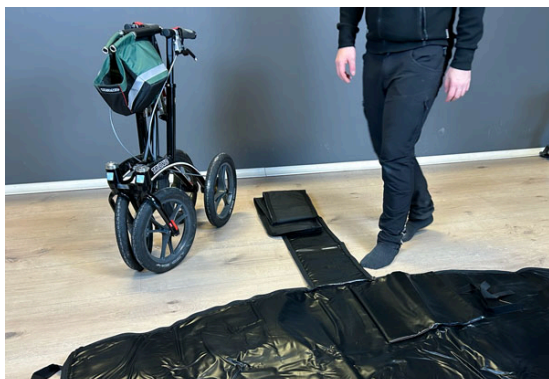


② Rozłóż główną torbę.

Rozsuń suwak głównej torby na całej jej długości i rozłóż kłapy torby na podłodze.

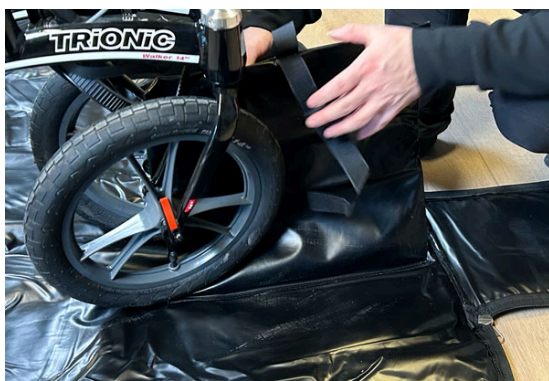

③ Umieść chodzik na torbie.


Umieść chodzik rehabilitacyjny Walker na środkowej części głównej torby transportowej. Główna torba ma zintegrowaną wyściełaną klapę ochronną z paskiem na rzep. Pociągnij wyściełaną klapę ochronną do góry i umieść ją między widelcami przednich kół, aby chronić lakier.

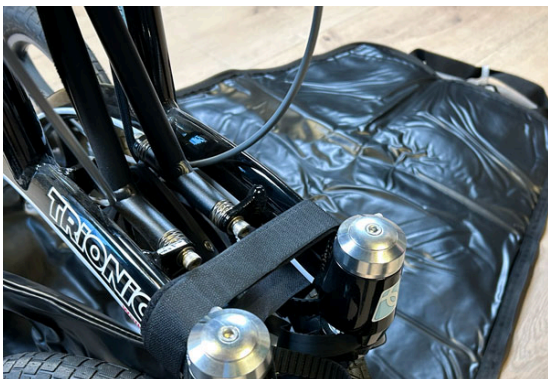

④ Zabezpiecz złożoną ramę za pomocą zintegrowanego paska na rzep.



⑤ Złóż środkową klapkę na Walker.

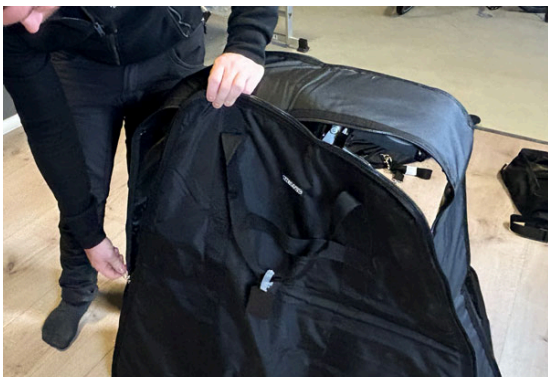

⑥ Podnieś boczne kłapy i zamknij główny zamek błyskawiczny.



⑦ Na tym zdjęciu Walker jest prawidłowo zapakowany.

Instrukcje pakowania



Zeskanuj kod QR za pomocą smartfona lub innego urządzenia, aby obejrzeć instrukcje wideo.