




## Ajuste do comprimento do eixo de liberação rápida

Importante certificar-se de que esteja ajustado corretamente!

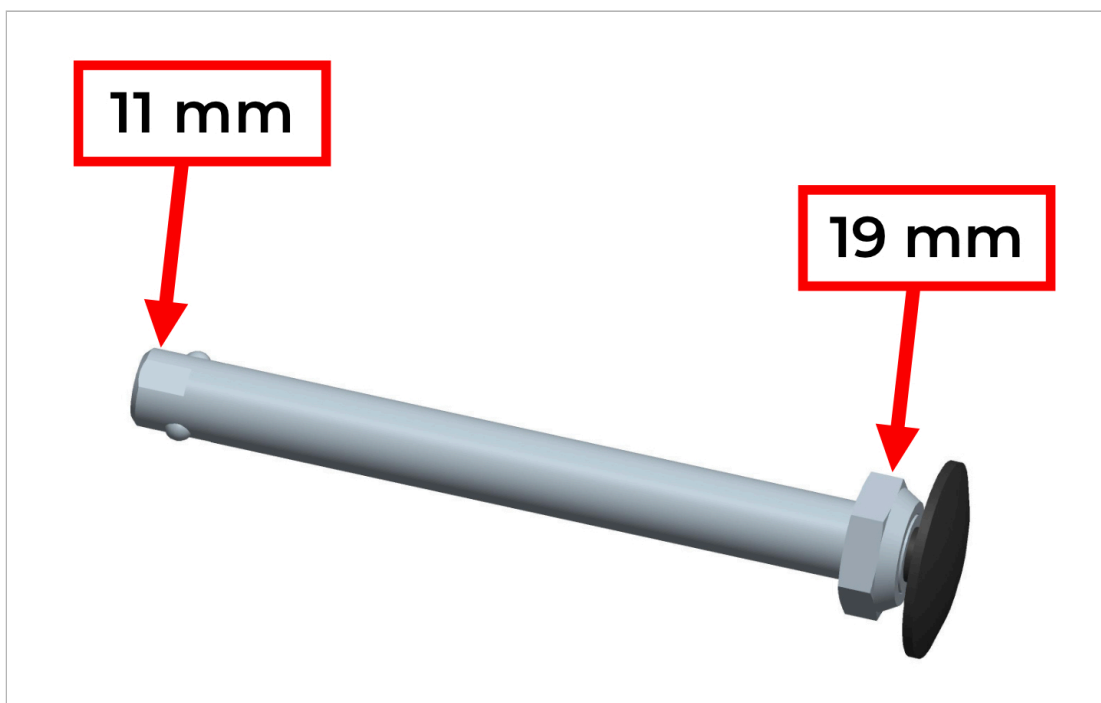

1. O eixo de liberação rápida tem duas superfícies planas em sua extremidade interna.
2. Aplique a chave de 11 mm na extremidade interna do eixo para evitar que o eixo gire.
3. Usando a chave de 19 mm, você pode ajustar a porca grande na extremidade externa do eixo.
4. Para aumentar o comprimento do eixo: Desaparafuse a porca - no sentido anti-horário.
5. Para diminuir o comprimento do eixo: Gire no sentido horário.
6. Ajuste a porca  $\frac{1}{2}$  volta de cada vez e depois verifique o conjunto.
7. Confirme se o eixo está travado corretamente no lugar (botão preto ejetado) e se não há folga lateral entre a roda e o quadro.

Caso tenha alguma dúvida, ligue para o nosso suporte ao cliente: +46-8-522 100 50