



## Manual: Trava de Cabo Trionic



① Localize o parafuso no suporte.



② Desaparafuse o parafuso com uma chave Allen de 4 mm.




③ Puxe a ponta da tira para fora do suporte.



④ Enrole a tira ao redor do tubo vertical traseiro do quadro Veloped (no Walker, o tubo semi-vertical do quadro).



⑤ Insira a extremidade da tira no suporte.

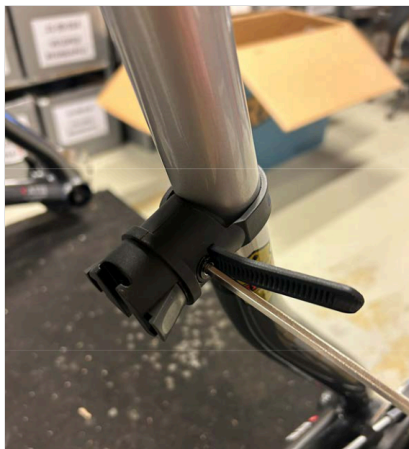


⑥ Aperte o parafuso/cinta com a chave Allen de 4 mm até que a tira esteja esticada.




⑦ Corte o excesso de comprimento da tira com um alicate ou faca.



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⑧ A foto mostra a fixação correta do suporte.



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⑨ Fixe a trava do cabo ao suporte por cima e empurre a trava do cabo para baixo até que ela se encaixe no suporte.



⑩ Para soltar a trava do cabo do suporte, pressione os dois botões cinzas e remova a trava do suporte.