




Suport pentru baston Veloped – Instrucțiuni de asamblare

Suport pentru baston format din 2 piese pentru Veloped, care funcționează și ca o curea de siguranță atunci când Veloped este pliat pentru transport sau depozitare. Suportul pentru baston se potrivește tuturor modelelor Veloped.

Scanați codul QR cu telefonul inteligent sau dispozitivul dvs. pentru a vizualiza instrucțiunile video.

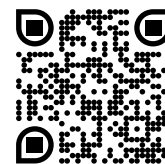

① Atașați suportul din spate.

Înfășurați suportul posterior în jurul părții superioare a țevii verticale a cadrului posterior, chiar sub butonul de eliberare rapidă de reglare a înălțimii.



② Trageți strâns cureaua.

Înfășurați cureaua în jurul tubului și fixați-o cu scai. Lăsați lungimea excesivă a curelei să atârne liber.



③ Reglați bucla din spate.

Dimensiunea buclei din spate poate fi ajustată prin slăbirea închiderii cu velcro. Este posibil să fie nevoie să strângeți ușor bucla pentru a obține o formă rotunjită/circulară.



④ Atașați suportul frontal.

Înfășurați suportul frontal în jurul tubului superior al cadrului, chiar în spatele șinei coșului. Asigurați-vă că suprafața antiderapantă este orientată spre tubul cadrului.



⑤ Ajustați bucla frontală.

Dimensiunea buclei frontale poate fi ajustată prin slăbirea închiderii cu velcro. Este posibil să fie nevoie să strângeți ușor bucla pentru a obține o formă rotunjită/circulară.



⑥ Atașați bastonul de mers.

Atașați bastonul împingându-l din spate, mai întâi prin spate și apoi prin suportul din față.



⑦ Fixați cadrul.

Puteți folosi cureaua pentru baston pentru a fixa cadrul atunci când este pliat, atunci când transportați sau depozitați Veloped-ul.