



## Manual: Încuietoare cu cablu Trionic



① Localizați șurubul de pe suport.



② Deșurubați șurubul cu o cheie imbus de 4 mm.




③ Trageți capătul curelei din suport.



④ Înfășurați cureaua în jurul tubului vertical posterior al cadrului Veloped (la Walker, tubul semi-vertical al cadrului).



⑤ Introduceți capătul curelei în suport.

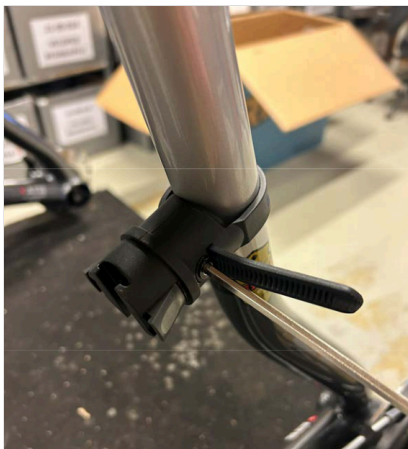


⑥ Strângeți șurubul/curea cu cheia imbus de 4 mm până când curea este strânsă.




⑦ Tăiați lungimea excesivă a curelei cu un tăietor de cabluri sau cu un cuțit.



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⑧ Fotografia arată fixarea corectă a suportului.



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⑨ Atașați blocatorul de cablu la suport de sus, împingeți blocatorul de cablu în jos până când se fixează cu un clic în suport.



⑩ Pentru a detașa încuietoarea cablului de pe suport, apăsați cele două butoane gri și scoateți încuietoarea din suport.