

Suport pentru sticle Veloped – Instrucțiuni de asamblare


Suport pentru bidon Veloped, fixat pe cadrul Veloped cu o clemă înșurubată. Culoare: negru.

Livrarea include un suport pentru bidon, o clemă de montare și o cheie Allen de 3 mm.

Scanați codul QR cu telefonul inteligent sau dispozitivul dvs. pentru a vizualiza instrucțiunile video.



① Deșurubați și scoateți un șurub de la suportul clemei.

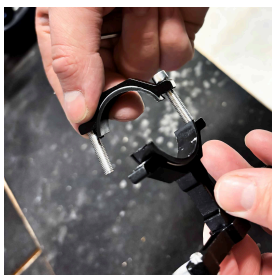

② Deșurubați celălalt șurub cât mai mult posibil, dar lăsați-l atașat de clemă.



③ Rotiți o jumătate a clemei cu 90 de grade pentru a facilita montarea clemei pe cadrul Veloped. Cu brațul scurt al suportului pentru bidon în sus, atașați clemă la partea verticală a țevii cadrului spate dreapta sau stânga a bicicletei Veloped. Când înșurubați clemă pe cadrul Veloped, asigurați-vă că ambele șuruburi sunt strânse în mod egal.



④ Slăbiți cele două șuruburi de pe suportul de fixare și apoi înșurubați suportul pentru sticle pe acesta, de preferință cu deschiderea laterală a suportului pentru sticle orientată spre exterior.



⑤ Suportul pentru sticle Veloped este acum montat corect și gata de utilizare.