




## **Ghid de utilizare pentru geanta de transport Veloped**

Geanta de transport Veloped include o geantă principală pentru cadrul Veloped și două geanți mai mici pentru roțile față și spate. Geanta de transport se potrivește tuturor modelelor Veloped.

Compatibil cu toate modelele Veloped.

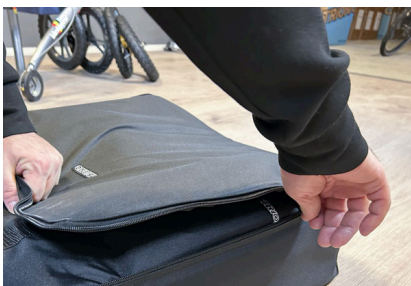


### ① Deschideți geanta principală.

Desfaceți fermoarul geantei de depozitare (care servește și ca geantă pentru roata din față) și despachetați geanta principală de transport și geanta pentru roata din spate.




### ② Împachetați roțile din față.

Detashați roata de cățarat din față de cadrul Veloped și puneți-o în geanta mai mare pentru roți și închideți fermoarul.

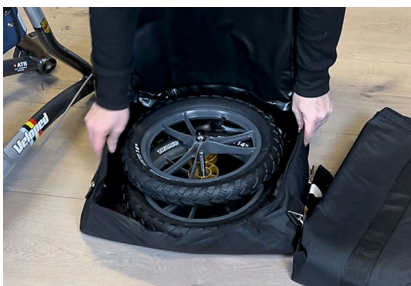


### ③ Împachetați roțile din spate.

Detashați cele două roți din spate de cadrul Veloped și puneți-le în geanta mai mică pentru roți și închideți fermoarul.

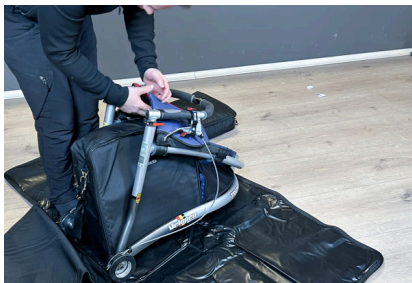

#### ④ Întindeți sacul principal

Desfaceți fermoarul genții principale pe toată lungimea și desfaceți geanta pe podea. Așezați cadrul pe secțiunea centrală a genții principale și plasați geanta mai mare pentru roata din față sub șaua Veloped-ului (între cele două tuburi verticale din spate ale cadrului).

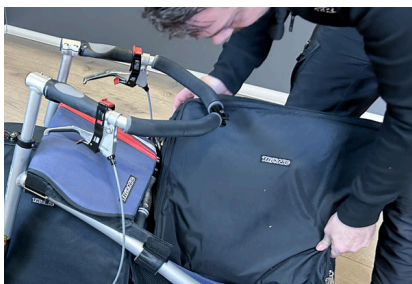

#### ⑤ Adăugați gențile de siguranță.

Slăbiți manetele de reglare rapidă a înălțimii și ridicați puțin bara de prindere, așezați geanta mai mică pentru roata din spate deasupra coșului Veloped și apoi coborâți bara de prindere în poziția inferioară.

#### ⑥ Închideți geanta.

Trageți „clapetele” genții principale peste Veloped și închideți fermoarul.

#### ⑦ Această fotografie prezintă Velopedul ambalat corect.

## **Instrucțiuni de ambalare**

*Scanați codul QR cu telefonul inteligent sau dispozitivul dvs. pentru a vizualiza instrucțiunile video.*