




## Suport pentru baston – instrucțiuni de asamblare

Suport pentru baston format din 2 piese, care se atașează la mâner și la cadrul Walker. Partea superioară are o funcție inteligentă de blocare rapidă, iar bastonul poate fi atașat și îndepărtat rapid. Compatibil cu roltoarele Walker 9er, 12er și 14er.

Scanați codul QR cu telefonul inteligent sau dispozitivul dvs. pentru a vizualiza instrucțiunile video.

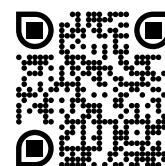

- ① Rotiți suportul superior astfel încât sigla să fie orientată în sus.



- ② Fixați suportul pe partea superioară a tubului mânerului. Fixați suportul pe partea superioară a tubului mânerului și apoi înșurubați-l în poziție cu o șurubelniță Phillips.




- ③ Dacă atașați atât suportul pentru baston, cât și spătarul

**Notă:** Reglați poziția manetei de frână astfel încât să existe loc pentru suportul superior pentru baston lângă spătar. Ar putea fi necesar să înclinați suportul pentru baston spre exterior, cu aproximativ 30 de grade, pentru a se potrivi suportul pentru baston și spătarul de pe Walker.




#### ④ Atașați suportul inferior la cadru

Pentru asamblarea pe partea dreaptă/stânga, rotiți suportul inferior astfel încât să puteți ajunge la șurub din exteriorul cadrului. Pentru a atașa suportul inferior la cadru, înfășurați curea în jurul tubului cadrului și împingeți-o în orificiul suportului.

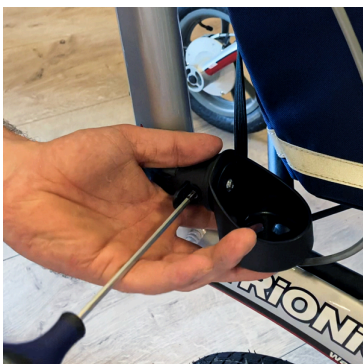

#### ⑤ Strângeți șurubul/curea

Strângeți șurubul/curea folosind o cheie Allen de 4 mm.

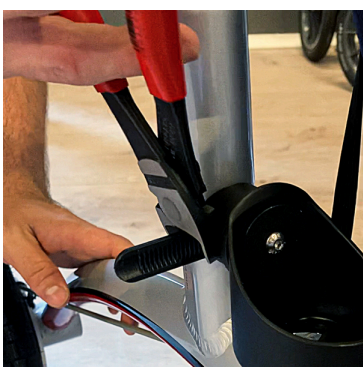

#### ⑥ Tăiați lungimea excesivă a curelei

Tăiați lungimea excesivă a curelei cu un clește de tăiat cabluri.



#### ⑦ Gata de utilizare