



## Manual: Asamblarea suportului pentru sticle pe Walker 12er mărimea S



① Locul de asamblare a suportului pentru sticle (dreapta sau stânga).



② Înfășurați cureaua în jurul țevii cadrului și trageți-o prin suport.



③ Trageți strâns cureaua și rotiți piulița în sensul acelor de ceasornic pentru a o strânge.



④ Tăiați cureaua excesivă.



⑤ Montați și al doilea suport în același mod.



⑥ Cele două suporturi asamblate corect pe țeava cadrului.



⑦ Fixați suportul pentru sticle cu cele două șuruburi. „Deschiderea” suportului pentru sticle trebuie să fie orientată spre exterior.



⑧ Suportul pentru sticle este acum atașat la cadru, iar sticla se introduce din lateral și se scoate spre exterior.