



Spătarul pentru călător Trionic – Instrucțiuni de asamblare



Spătarul ergonomic și căptușit, fabricat din poliester 600D hidrofug și durabil, se potrivește rolilor Walker 9er, 12er și 14er. Acesta oferă un suport confortabil și sigur atunci când sunteți așezat.

Lungimea/adâncimea spătarului este reglabilă.

① Deșurubați.

Scoateți șuruburile și piulițele de la cele două cleme.

② Atașați spătarul.

Deschideți puțin clemele și atașați-le la tuburile de prindere. **IMPORTANT:** Asigurați-vă că sigla „TRIONIC” este poziționată corect, deoarece spătarul este înclinat.



③ Până la capăt.

Împingeți cele două cleme până sus. Poate fi necesar să slăbiți șurubul de pe maneta de frână pentru a o mișca puțin în spate.






④ fixați spătarul.

Cu o cheie Allen de 4 mm, fixați ambele cleme cu șuruburile și piulițele. Curelele spătarului trebuie să fie orientate înainte în punctul de fixare.

⑤ Această fotografie prezintă asamblarea corectă.

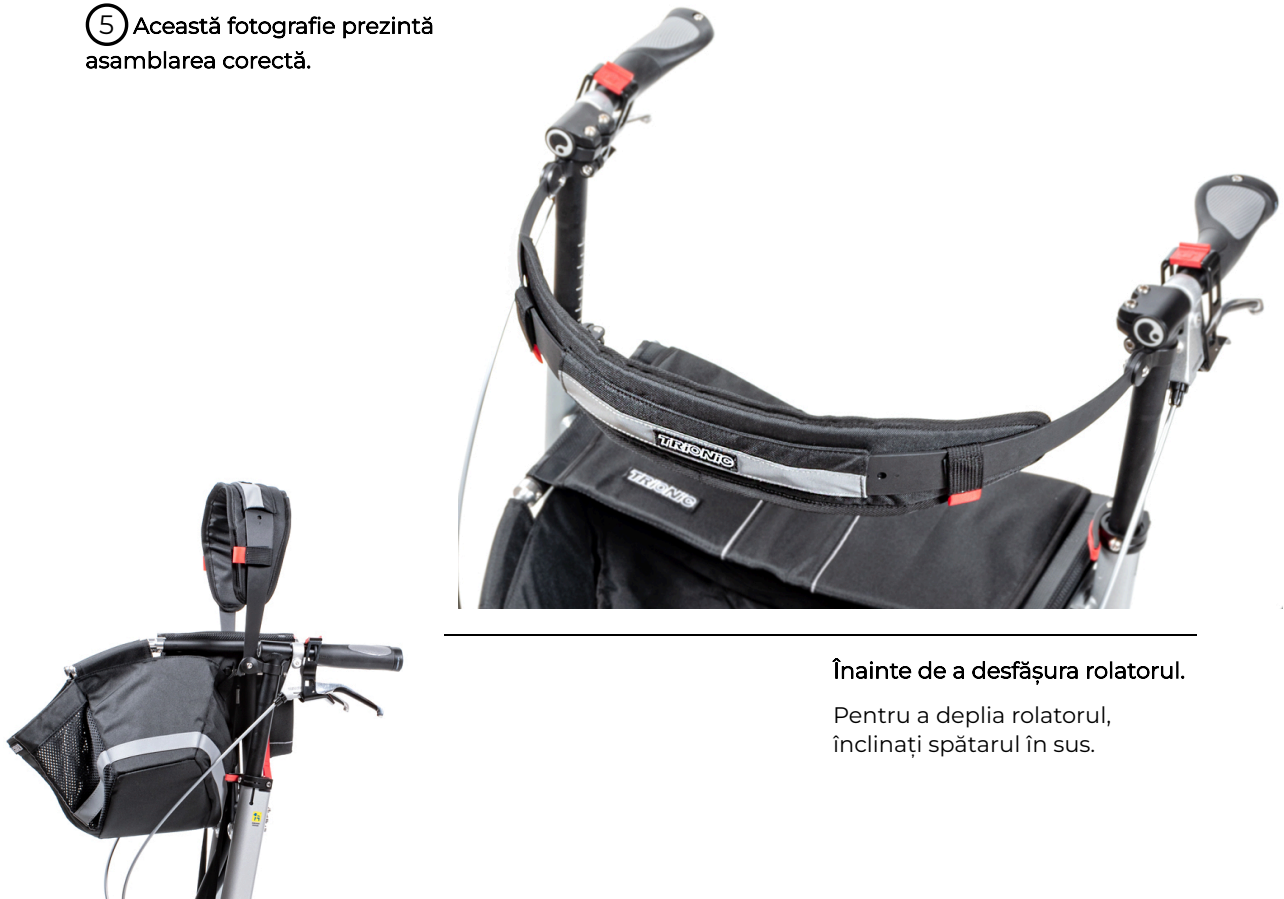

Înainte de a desfășura rolatorul.

Pentru a deplia rolatorul, înclinați spătarul în sus.

Dacă este necesar.

Dacă spătarul vi se pare prea scurt/prea lung, puteți ajusta lungimea. Scoateți cele două șuruburi și piulițe și apoi asamblați din nou spătarul.

