



Instrucțiuni de ambalare pentru geanta de transport Walker


Geanta de transport Walker este formată dintr-o geantă principală de transport și o geantă mai mică de depozitare/transport. Geanta de transport se potrivește tuturor modelelor Walker.

Compatibil cu toate modelele Trionic Walker.




① Deschideți geanta principală

Desfaceți fermoarul geantei de depozitare și despachetați geanta principală de transport.

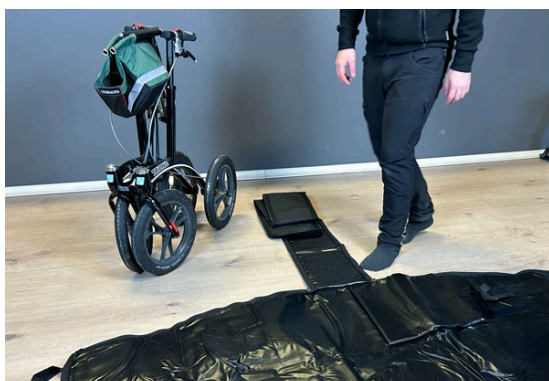


② Întindeți sacul principal.

Desfaceți fermoarul genții principale pe toată lungimea și desfaceți clapetele genții pe podea.

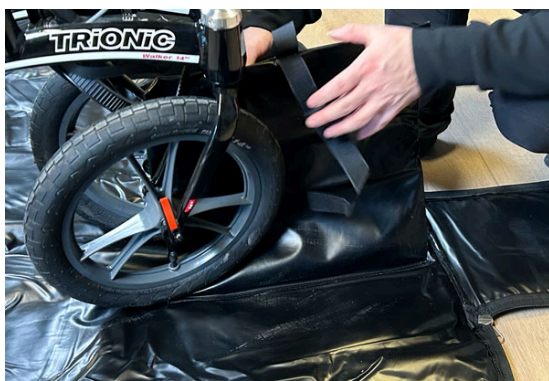

③ Așezați mersul pe geantă.


Așezați Walker-ul în secțiunea centrală a genții principale de transport. Geanta principală are o clapă de protecție căptușită integrată cu o curea Velcro. Trageți clapeta de protecție căptușită în sus și plasați-o între furcile roților din față pentru a proteja vopseaua.

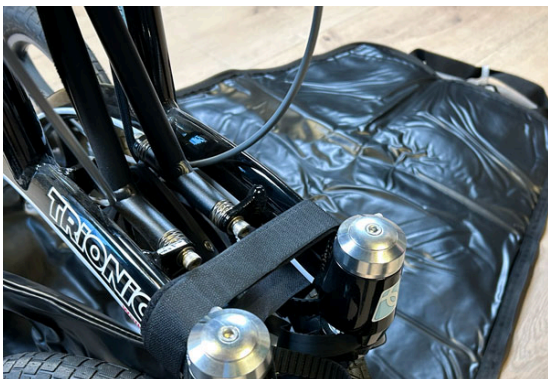

④ Fixați cadrul pliat cu cureaua Velcro integrată.



⑤ Îndoțiți clapeta centrală peste Walker.

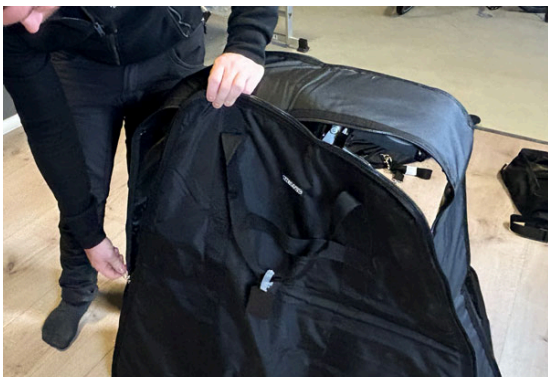

⑥ Ridicați clapetele laterale și închideți fermoarul principal.



⑦ Această fotografie prezintă Walker-ul ambalat corect.

Instrucțiuni de ambalare



Scanați codul QR cu telefonul inteligent sau dispozitivul dvs. pentru a vizualiza instrucțiunile video.