



## **Держатель для трости на Veloped – инструкция по сборке**

Двухсекционный держатель трости для Veloped, который также служит в качестве ремня безопасности, когда Veloped сложен для транспортировки или хранения. Держатель трости подходит для всех моделей Veloped.

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона или устройства, чтобы просмотреть видеoinструкцию.

### **1 Прикрепите задний держатель.**

Оберните задний держатель вокруг верхней части задней вертикальной трубы рамы, прямо под быстроразъёмным фиксатором регулировки высоты.

### **2 Туго затяните ремень.**

Плотно затяните ремешок, оберните его вокруг трубы рамы и закрепите имеющейся на нём липучкой. Оставшаяся длина ремешка может свободно свисать.

### **3 Отрегулируйте заднюю петлю.**

Можно регулировать размер петли заднего держателя с помощью застёжки-липучки. Чтобы петля приняла округлую форму, следует слегка сузить её, затянув ремешок потуже.

**④ Прикрепите передний держатель.**

Оберните передний держатель вокруг верхней (горизонтальной) трубы рамы, рядом с передним креплением корзины. Убедитесь, что противоскользкая накладка на ремешке обращена внутренней стороной к трубе рамы.

**⑤ Отрегулируйте переднюю петлю.**

Можно регулировать размер петли переднего держателя с помощью застёжки-липучки. Чтобы петля приняла округлую форму, следует слегка сузить её, затянув ремешок потуже.

**⑥ Прикрепите трость.**

Чтобы прикрепить трость на роллатор, нужно поместить её через задний держатель в передний держатель трости.

**⑦ Закрепите раму.**

Можно использовать ремешок держателя для трости, чтобы зафиксировать и таким образом защитить сложенный роллатор от поломок во время его транспортировки или хранения.