



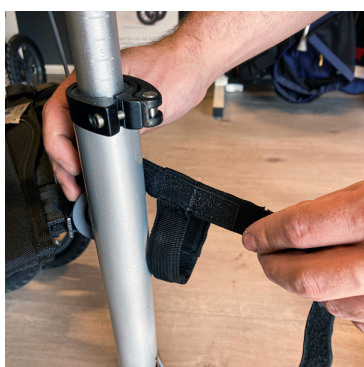

## Держатель для трости на Veloped – инструкция по сборке

Двухсекционный держатель трости для Veloped, который также служит в качестве ремня безопасности, когда Veloped сложен для транспортировки или хранения. Держатель трости подходит для всех моделей Veloped.

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона или устройства, чтобы просмотреть видеоинструкцию.

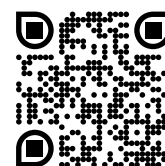

### 1 Прикрепите задний держатель.

Оберните задний держатель вокруг верхней части задней вертикальной трубы рамы, прямо под быстроразъёмным фиксатором регулировки высоты.



### 2 Туго затяните ремень.

Плотно затяните ремешок, оберните его вокруг трубы рамы и закрепите имеющейся на нём липучкой. Оставшаяся длина ремешка может свободно свисать.



### 3 Отрегулируйте заднюю петлю.

Можно регулировать размер петли заднего держателя с помощью застёжки-липучки. Чтобы петля приняла округлую форму, следует слегка сузить её, затянув ремешок потуже.



#### ④ Прикрепите передний держатель.

Оберните передний держатель вокруг верхней (горизонтальной) трубы рамы, рядом с передним креплением корзины. Убедитесь, что противоскользящая накладка на ремешке обращена внутренней стороной к трубе рамы.



#### ⑤ Отрегулируйте переднюю петлю.

Можно регулировать размер петли переднего держателя с помощью застёжки-липучки. Чтобы петля приняла округлую форму, следует слегка сузить её, затянув ремешок потуже.



#### ⑥ Прикрепите трость.

Чтобы прикрепить трость на роллатор, нужно поместить её через задний держатель в передний держатель трости.



#### ⑦ Закрепите раму.

Можно использовать ремешок держателя для трости, чтобы зафиксировать и таким образом защитить сложенный роллатор от поломок во время его транспортировки или хранения.