

Подставка для бутылок с петлями – Инструкция по сборке


Универсальный держатель для бутылочки Veloped и роллатора, крепящийся к раме Veloped с помощью винтового зажима. Цвет: черный.

В комплект поставки входят держатель для бутылочки, зажим и шестигранный ключ на 3 мм.

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона или устройства, чтобы просмотреть видеоинструкцию.



① Открутите и снимите один винт с зажимного крепления.

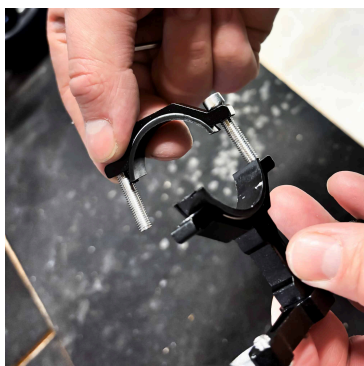

② Открутите второй винт как можно сильнее, но оставьте его прикрепленным к зажиму.



③ Поверните одну половину зажима на 90 градусов, чтобы облегчить его установку на раму Veloped. Расположив короткий рычаг держателя бутылки вверх, прикрепите зажим к вертикальной части правой или левой задней трубы рамы Veloped. При завинчивании зажима на раму Veloped убедитесь, что оба винта затянуты одинаково.



④ Ослабьте два винта на кронштейне зажима, а затем прикрутите к нему держатель для бутылки, желательно так, чтобы боковое отверстие держателя для бутылки было направлено наружу.



⑤ Держатели для бутылок Veloped теперь правильно установлены и готовы к использованию. Отлично!