



Держатель трости для ходьбы – инструкция по сборке

Держатель трости из 2 частей, который крепится к ручке и раме Walker. Верхняя часть имеет интеллектуальную функцию быстрой фиксации, и трость можно быстро прикрепить и снять. Подходит для ходунков Walker 9er, 12er и 14er.

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона или устройства, чтобы просмотреть видеoinструкцию.



- 1 Поверните верхний держатель так, чтобы логотип был обращен вверх.



- 2 Закрепите держатель на верхней части трубки рукоятки.

Зашелкните держатель на верхней части трубки рукоятки, а затем прикрутите его на место с помощью крестообразной отвертки.



- 3 Если вы прикрепите держатель трости и спинку

Примечание: Отрегулируйте положение рычага тормоза так, чтобы было место для верхнего держателя трости рядом со спинкой. Может потребоваться наклонить держатель трости наружу, примерно на 30 градусов, чтобы подогнать держатель трости и спинку к Walker.




④ Прикрепите нижний держатель к раме.

Для сборки с правой/левой стороны поверните нижний держатель так, чтобы можно было дотянуться до винта с внешней стороны рамы. Чтобы прикрепить нижний держатель к раме, оберните ремень вокруг трубы рамы и вставьте его в отверстие держателя.



⑤ Затяните винт/ремень

Затяните винт/ремень с помощью шестигранного ключа на 4 мм.

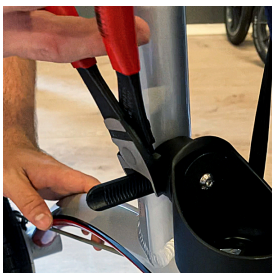

⑥ Отрежьте лишнюю длину ремня.

Отрежьте лишнюю часть ремня с помощью резака.



⑦ Готов к использованию