



## Спинка Walker Backrest – Инструкция по сборке



Эргономичная и мягкая спинка, изготовленная из водоотталкивающего и прочного полиэстера 600D, подходит для роляторов Walker 9er, 12er и 14er. Она обеспечивает удобную и безопасную поддержку, когда вы сидите.

Длина/глубина спинки регулируется.

### ① Открутить.

Извлеките винты и гайки из двух зажимов.

### ② Прикрепите спинку.

Немного приоткройте зажимы и прикрепите их к захватным трубкам.

**ВАЖНО:** Убедитесь, что логотип "TRIONIC" расположен правильно, так как спинка сиденья находится под углом.



### ③ До самого верха.

Протяните оба зажима на самый верх. Возможно, придется ослабить винт на тормозном рычаге, чтобы немного сдвинуть его назад.





④ закрепите спинку.

При помощи шестигранного ключа на 4 мм закрепите оба зажима винтами и гайками. Ремни спинки должны быть направлены вперед в месте крепления.

⑤ На этой фотографии показан правильный монтаж.



Перед тем как раскладывать ходунки.

Чтобы сложить ролятор, поверните спинку сиденья вверх.

При необходимости.

Если спинка слишком короткая/длинная, можно отрегулировать ее длину. Извлеките два винта и гайки, а затем снова соберите спинку.

