



Руководство: Замена ремня спинки Trionic Walker



- ① Открутите винт, удерживающий ремешок, с помощью шестигранного ключа на 3 мм.
Повторите то же самое с другой стороны.



- ② Обязательно извлеките винт, гайку и трубчатую распорную втулку.





Руководство: Замена ремня спинки Trionic Walker



- ⑤ Вставьте новый сменный ремень в прокладку.

ВАЖНО: Обязательно совместите конец ремешка с логотипом TRIONIC, как показано на фотографии.



- ⑥ Вставьте трубчатую распорку в отверстие на конце ремня.

