



Транспортная сумка Walker – Инструкции по упаковке


Транспортная сумка Walker состоит из основной транспортной сумки и меньшей сумки для хранения/переноски. Транспортная сумка подходит для всех моделей Walker.

Подходит для всех моделей Trionic Walker.




1 Откройте основную сумку.

Расстегните молнию на сумке для хранения и распакуйте основную транспортную сумку.

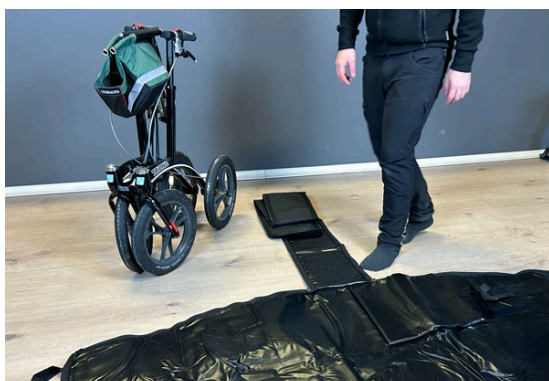


2 Разложите основной мешок.

Расстегните молнию основной сумки по всей длине и разверните клапаны сумки на полу.

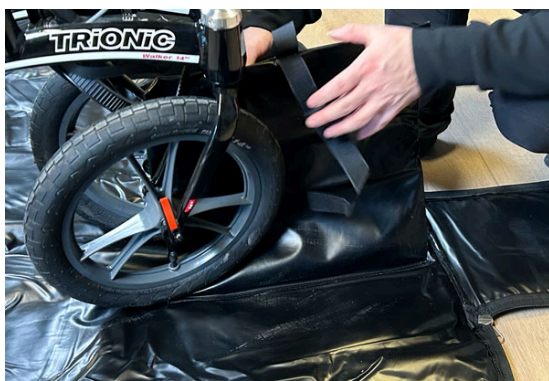

3 Положите ходунки на сумку.


Поместите Walker в центральную часть основной транспортной сумки. Основная сумка имеет встроенный защитный клапан с мягкой подкладкой и ремешком на липучке. Потяните защитный клапан с мягкой подкладкой вверх и поместите его между вилками передних колес, чтобы защитить лакокрасочное покрытие.

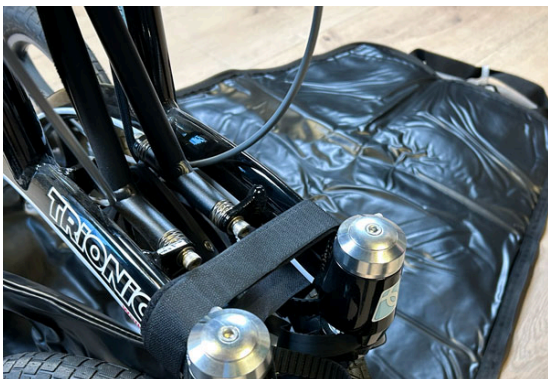

④ Закрепите сложенную раму с помощью встроенного ремня-липучки.



⑤ Сложите центральный клапан над Уокером.

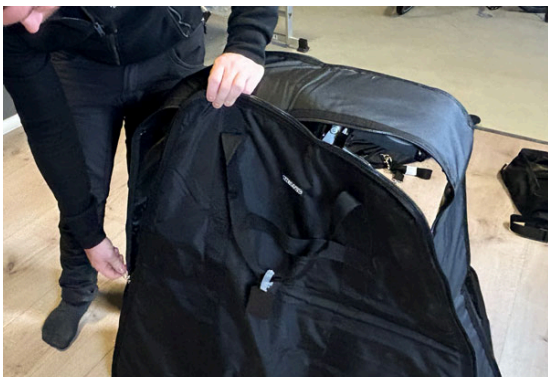

⑥ Поднимите боковые клапаны и застегните основную молнию.



⑦ На этой фотографии показан правильно упакованный Walker.

Инструкции по упаковке



Отсканируйте QR-код с помощью смартфона или устройства, чтобы просмотреть видеоинструкцию.