



Držiak na palicu na chodítko – návod na montáž

Dvojdielny držiak na palicu, ktorý sa pripevňuje k rukoväti a rámu chodítka. Horná časť má inteligentnú funkciu rýchleho uzamknutia, vďaka čomu sa palica dá rýchlo pripevniť a odstrániť. Vhodný pre rolátory Walker 9, 12 a 14 palcov.

Naskenujte QR kód pomocou smartfónu alebo iného zariadenia a pozrite si video s pokynmi.



- ① Otočte horný držiak tak, aby logo smerovalo nahor.



- ② Nasadte držiak na hornú časť trubice rukoväte.

Nasadte držiak na hornú časť rúrky rukoväte a potom ho priskrutkujte na miesto pomocou krížového skrutkovača.




- ③ Ak pripevníte držiak na palicu aj operadlo

Poznámka: Upravte polohu brzdovej páky tak, aby bol priestor pre horný držiak palice vedľa operadla. Môže byť potrebné držiak palice nakloniť smerom von, približne o 30 stupňov, aby sa držiak palice a operadlo zmestili na chodítko.




④ Pripevnite spodný držiak k rámu

Pri montáži na pravú/ľavú stranu otočte spodný držiak tak, aby ste dosiahli skrutku z vonkajšej strany rámu. Ak chcete pripevniť spodný držiak k rámu, omotajte popruh okolo rámovej trubky a zatlačte ho do otvoru v držiaku.

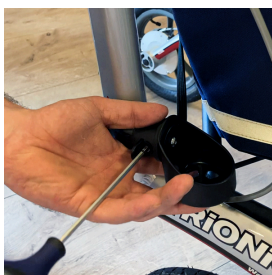

⑤ Utiahnite skrutku/pásik

Skrutku/pásik utiahnite pomocou 4 mm imbusového kľúča.

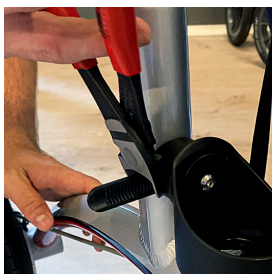

⑥ Odstrihnite nadmernú dĺžku popruhu

Prebytočnú dĺžku popruhu odstrihnite nožnicami na káble.



⑦ Pripravené na použitie