



Operadlo Trionic Walker – návod na montáž

Ergonomické a polstrované operadlo vyrobené z vodeodolného a odolného polyesteru 600D je vhodné pre kolieska Walker 9, T2 a 14. Ponúka pohodlnú a bezpečnú oporu pri sedení.

Dĺžka/hĺbka operadla je nastaviteľná.

① Odskrutkujte.

Odstráňte skrutky a matice z dvoch svoriek.

② Pripevnite operadlo.

Mierne otvorte svorky a

pripevnite ich k rukovätiam.

DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že logo „TRiONiC“ je správne umiestnené, pretože operadlo je naklonené.

③ Celú cestu hore.

Zatlačte dve svorky úplne hore. Možno budete musieť povoliť skrutku na brzdovej páke, aby ste ju mohli trochu posunúť dozadu.

4 upevnite operadlo.

Pomocou 4 mm imbusového kľúča upevnite obe svorky skrutkami a maticami. Popruhy operadla by mali v mieste upevnenia smerovať dopredu.

5 Táto fotografia zobrazuje správnu montáž.

Pred rozložením rolátora.

Ak chcete rolovaciu opierku rozložiť, nakloňte operadlo nahor.

Ak je to potrebné.

Ak sa vám zdá, že operadlo je príliš krátke/príliš dlhé, môžete ho nastaviť. Odstráňte dve skrutky a matice a potom operadlo znova zmontujte.