



## Operadlo Trionic Walker – návod na montáž



Ergonomické a polstrované operadlo vyrobené z vodeodolného a odolného polyesteru 600D je vhodné pre kolieska Walker 9, 12 a 14. Ponúka pohodlnú a bezpečnú oporu pri sedení.

Dĺžka/hĺbka operadla je nastaviteľná.

### ① Odskrutkujte.

Odstráňte skrutky a matice z dvoch svoriek.

### ② Pripevnite operadlo.

Mierne otvorte svorky a pripevnite ich k rukovätiam.  
**DÔLEŽITÉ:** Uistite sa, že logo „TRIONIC“ je správne umiestnené, pretože operadlo je naklonené.



### ③ Celú cestu hore.

Zatlačte dve svorky úplne hore. Možno budete musieť povoliť skrutku na brzdovej páke, aby ste ju mohli trochu posunúť dozadu.





④ upevnite operadlo.

Pomocou 4 mm imbusového kľúča upevnite obe svorky skrutkami a maticami. Popruhy operadla by mali v mieste upevnenia smerovať dopredu.

⑤ Táto fotografia zobrazuje správnu montáž.



Pred rozložením rolátora.

Ak chcete rolovaciu opierku rozložiť, nakloňte operadlo nahor.

Ak je to potrebné.

Ak sa vám zdá, že operadlo je príliš krátke/príliš dlhé, môžete ho nastaviť. Odstráňte dve skrutky a matice a potom operadlo znova zmontujte.

