



Manuál: Výmena popruhu opierky chrbta Trionic Walker




① Odskrutkujte skrutku, ktorá drží remienok, pomocou 3 mm imbusového kľúča.

Opakujte na opačnej strane.



② Uistite sa, že ste odstránili skrutku, maticu a rúrkovú dištančnú podložku.

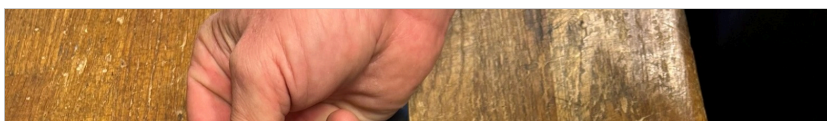



Manuál: Výmena popruhu opierky chrbta Trionic Walker



- ⑤ Vložte nový náhradný popruh do výstelky.

DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že koniec popruhu je zarovnaný s logom TRIONIC, ako je znázornené na fotografii.



- ⑥ Vložte rúrkovú dištančnú vložku do otvoru na konci popruhu.

