



Držalo za palico Veloped – Navodila za sestavljanje

Dvodelno držalo za palico za Veloped, ki služi tudi kot varnostni trak, ko je Veloped zložen za prevoz ali shranjevanje. Držalo za palico je primerno za vse modele Veloped.

Za ogled video navodil skenirajte QR-kodo s pametnim telefonom ali napravo.



① Pritrdite zadnji nosilec.

Zadnji nosilec ovijte okoli zgornjega dela zadnje navpične cevi okvirja, tik pod hitrim zapenjalom za nastavitev višine.

② Tesno zategnite trak.

Trak ovijte okoli cevi in ga pritrdite z ježkom. Odvečni del traku pustite prosto viseti.

③ Prilagodite zadnjo zanko.

Velikost zadnje zanke lahko prilagodite z zrahljanjem ježka. Za zaokroženo/krožno obliko boste morda morali zanko nežno stisniti.

④ Pritrdite sprednji nosilec.

Sprednji nosilec ovijte okoli zgornje cevi okvirja, tik za pritrdivijo nosilca košare. Prepričajte se, da je protizdrsni obliž obrnjen proti cevi okvirja.

⑤ Prilagodite sprednjo zanko.

Velikost sprednje zanke lahko prilagodite z zrahljanjem ježka. Za zaokroženo/krožno obliko boste morda morali zanko nežno stisniti.

⑥ Pritrdite pohodno palico.

Pohodno palico pritrдите tako, da jo potisnete od zadaj, najprej skozi zadnji in nato skozi sprednji nosilec.

⑦ Zavarujte okvir.

Trak za držalo palice lahko uporabite za pritrđitev okvirja, ko je zložen, med prevozom ali shranjevanjem vašega Veloped-a.