



Dežna prevleka Veloped (S) – Uporabniški priročnik

Za ogled video navodil skenirajte QR-kodo s pametnim telefonom ali napravo.

Dežna prevleka, ki ščiti sedež in košaro kolesa Veloped.


Dvobarvna zasnova Veloped: srebrna/črna



① Pritrdite vrstico.

Elastiko pritrdite okoli zgornje cevi okvirja.

Opomba: Obrnite prevleko, da dobite zeleno barvo.

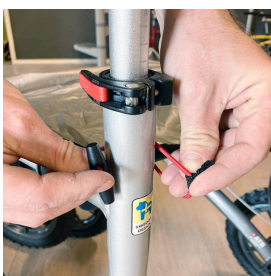

② Druga pritrdilna točka.

Dežno prevleko je mogoče pritrditi tudi na zadnji del.



③ Sprednja pritrdilna točka.

Dežna prevleka je ovita okoli sprednjega dela okvirja.



④ Pri hoji.

Med hojo zrahljajte zadnje elastične vrvice.



⑤ Shranite dežno prevleko.

Dežno prevleko shranite v košari ali v žepu z zadrgo.



⑥ Pripravljeno za uporabo v deževnem vremenu.