




Držalo za palico za hojo – navodila za sestavljanje

Dvodelno držalo za palico, ki je pritrjeno na ročaj in ogrodje hojice. Zgornji del ima pametno funkcijo hitrega zaklepanja, palico pa je mogoče hitro pritrčiti in odstraniti. Primerno za rolatorje Walker 9, 12 in 14 let.

Za ogled video navodil skenirajte QR-kodo s pametnim telefonom ali napravo.

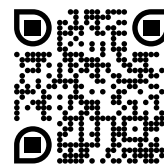

① Zgornji nosilec obrnite tako, da bo logotip obrnjen navzgor.



② Držalo namestite na zgornji del cevi ročaja.

Držalo namestite na zgornji del cevi ročaja in ga nato privijte s križnim izvijačem.




③ Če pritrдите tako držalo za palico kot tudi naslonjalo

Opomba: Prilagodite položaj zavorne ročice tako, da bo ob naslonjalu prostora za zgornji nosilec palice. Morda bo treba nosilec palice nagniti navzven, približno za 30 stopinj, da se nosilec palice in naslonjalo prilegata hojici.




④ Pritrdite spodnji nosilec na okvir

Za montažo na desno/levo stran obrnite spodnji nosilec, da boste lahko dosegli vijak z zunanje strani okvirja. Za pritrditev spodnjega nosilca na okvir ovijte trak okoli cevi okvirja in ga potisnite v luknjo nosilca.

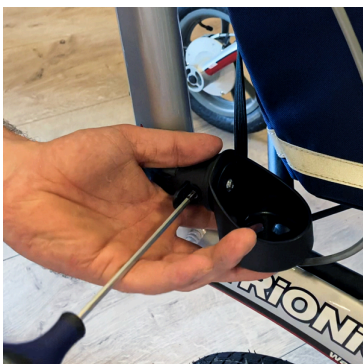

⑤ Privijte vijak/trak

Vijak/trak privijte s 4 mm imbus ključem.

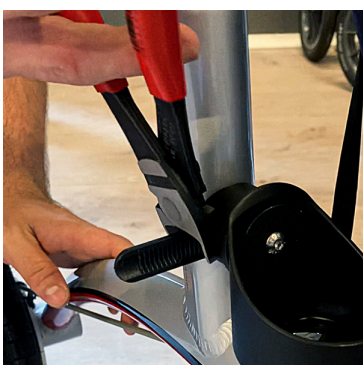

⑥ Odrežite odvečno dolžino traku

Odvečno dolžino traku odrežite z rezalnikom za kable.



⑦ Pripravljeno za uporabo