



## Priročnik: Sestavljanje držala za bidone na Walker 12er velikost S




① Mesto montaže držala za steklenice (R ali L).



② Trak ovijte okoli cevi okvirja in ga povlecite skozi držalo.



③ Tesno privijte trak in obrnite matico v smeri urinega kazalca, da ga zategnete.

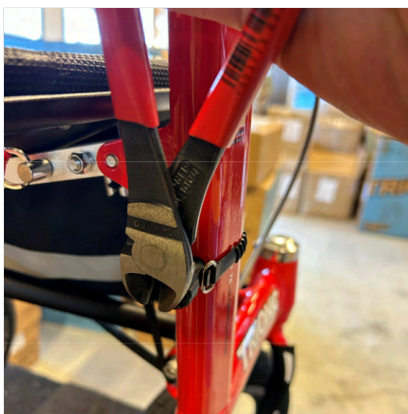


④ Odrežite odvečni trak.



⑤ Drugi nosilec namestite na enak način.



⑥ Dva držala pravilno nameščena na okvirni cevi.

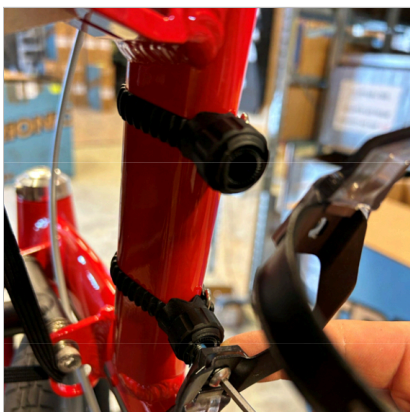

⑦ Držalo za steklenice pritrdite z dvema vijakoma. »Odprtina« držala za steklenice mora biti obrnjena navzven.



⑧ Držalo za steklenico je sedaj pritrjeno na okvir, steklenico pa vstavite s strani in jo izvlečete navzven.