



## Naslonjalo za hojo Trionic – navodila za sestavljanje

Ergonomsko in oblažinjeno naslonjalo, izdelano iz vodoodbojnega in trpežnega poliestra 600D, je primerno za vozičke Walker 9, 12 in 14 let. Ponuja udobno in varno oporo med sedenjem.

Dolžina/globina naslonjala je nastavljiva.

### ① Odvijte.

Odstranite vijake in matice z obeh sponk.

---

### ② Pritrdite hrbtno naslonjalo.

Malo odprite objemke in jih pritrdite na ročajne cevi.

**POMEMBNO:** Prepričajte se, da je logotip »TRIONIC« pravilno nameščen, saj je naslonjalo nagnjeno.

---

### ③ Vse do vrha.

Potisnite obe sponki do samega vrha. Morda boste morali zrahljati vijak na zavorni ročici, da jo boste lahko nekoliko premaknili nazaj.

**4 pritrдите naslonjalo.**

Z 4 mm imbus ključem pritrđite obe sponi z vijaki in maticami. Trakovi naslonjala morajo biti na mestu pritrđitve usmerjeni naprej.

---

**5** Ta fotografija prikazuje pravilno sestavljanje.

---

**Preden razgrnete valjček.**

Za razklop rolatorja nagnite naslonjalo navzgor.

---

**Če je potrebno.**

Če se vam zdi naslonjalo prekratko/predolgo, lahko prilagodite dolžino. Odstranite dva vijaka in matice ter nato naslonjalo ponovno sestavite.