



Priročnik: Zamenjava traku za hrbet hodulje Trionic




- ① Z 3 mm imbus ključem odvijte vijak, ki drži trak.

Ponovite na nasprotni strani.



- ② Poskrbite, da boste odstranili vijak, matico in cevni distančnik.

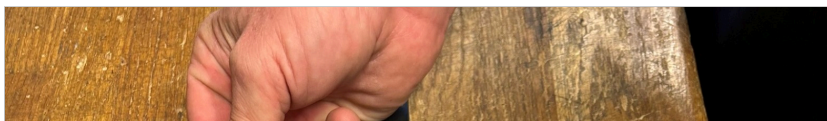



Priročnik: Zamenjava traku za hrbet hodulje Trionic



- ⑤ Vstavite novi nadomestni trak v oblazinjenje.

POMEMBNO: Konec traku poravnajte z logotipom TRIONIC, kot je prikazano na sliki.



- ⑥ Vstavite cevasti distančnik v luknjo na koncu traku.

