



Priročnik: Zamenjava traku za hrbet hodulje Trionic




① Z 3 mm imbus ključem odvijte vijak, ki drži trak.

Ponovite na nasprotni strani.



② Poskrbite, da boste odstranili vijak, matico in cevni distančnik.

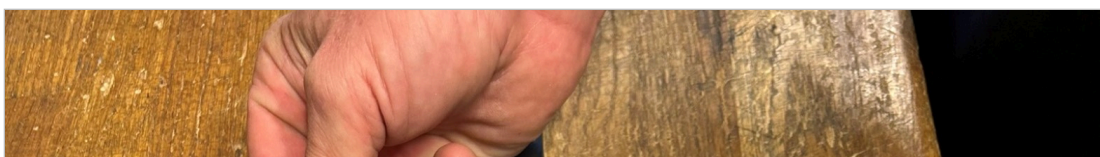



Priročnik: Zamenjava traku za hrbet hodulje Trionic



⑤ Vstavite novi nadomestni trak v oblazinjenje.

POMEMBNO: Konec traku poravnajte z logotipom TRIONIC, kot je prikazano na sliki.



⑥ Vstavite cevasti distančnik v luknjo na koncu traku.

