



Transportna torba Walker – Navodila za pakiranje


Transportna torba Walker je sestavljena iz glavne transportne torbe in manjše torbe za shranjevanje/prenašanje. Transportna torba je primerna za vse modele Walker.

Primerno za vse modele Trionic Walkerjev.




① Odprite glavno vrečko

Odprite zadrgo vrečke za shranjevanje in razpakirajte glavno transportno torbo.

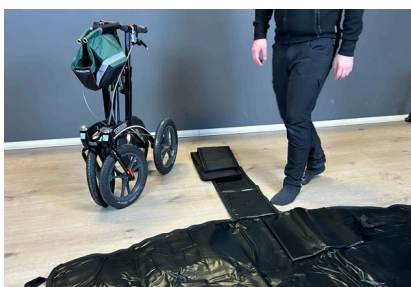


② Razširite glavno vrečko.

Odprite celotno zadrgo glavne torbe in razgrnite zavihke torbe na tleh.

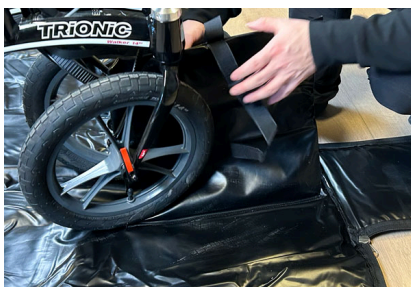

③ Postavite hojico na torbo.

Hoduljico postavite na srednji del glavne transportne torbe. Glavna torba ima integriran oblazinjen zaščitni pokrov z ježkom. Oblazinjen zaščitni pokrov povlecite navzgor in ga namestite med vilici sprednjih koles, da zaščitite lak.

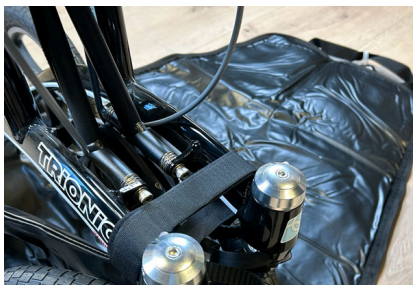

④ Zložen okvir pritrdite z integriranim ježkom.



⑤ Srednji zavihek prepognite čez Walker.

⑥ Dvignite stranske zavihke in zaprite glavno zadrgo.

⑦ Ta fotografija prikazuje Walkerja, ko je pravilno zapakiran.

Navodila za pakiranje

*Za ogled video navodil
skenirajte QR-kodo s pametnim
telefonom ali napravo.*