



Geniřletilmiř Őiře Tutucu – Montaj Talimatları

Veloped ve rollator iin evrensel boyutta Őiře tutucu, vidalı kelepe ile Veloped erevesine sabitlenir. Renk: siyah.

Teslimat ierięi: Őiře tutucu, kelepe baęlantı parası ve 3 mm alyan anahtarı.

Video talimatlarını grntlemek iin QR kodunu akıllı telefonunuz veya cihazınızla tarayın.




① Kelepe baęlantı noktasındaki vidalardan birini skn ve ıkarın.



② Dięer vidayı olabildięince gevřetin, ancak kelepeye baęlı bırakın.



③ Kelepenin bir yarısını 90 derece dndrerek kelepeyi eęimli erveye takmayı kolaylařtırabilirsiniz. Őiře tutucunun kısa kolu yukarı bakacak Őekilde, kelepeyi Veloped'in saę veya sol arka erve borusunun dikey kısmına takın. Kelepeyi Veloped ervesine vidalarken, her iki vidanın da eřit Őekilde sıkıldıęından emin olun.

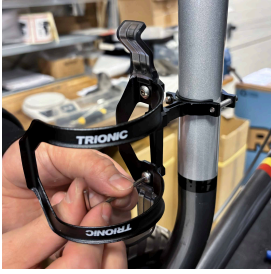

- ④ Kelepçe braketindeki iki vidayı gevşetin ve ardından şişe tutucuyu, tercihen şişe tutucunun yan açıklığı dışa bakacak şekilde, brakete vidalayın.



- ⑤ Genişletilmiş şişe tutucular artık doğru şekilde monte edildi ve kullanıma hazır. Tebrikler.