



Trionic Walker Sırt Desteđi – Montaj Talimatı

Su itici ve dayanıklı 600D polyesterden yapılmıř ergonomik ve dolgulu sırtlık, Walker 9er, 12er ve 14er rollatörlere uyar. Oturduđunuzda rahat ve güvenli bir destek sunar.

Sırt kısmının uzunluđu/derinliđi ayarlanabilir.

1 Vidaları sökün.

İki kelepçeden vidaları ve somunları çıkarın.

2 Sırtlıđı takın.

Kelepçeleri biraz açın ve bunları tutma borularına takın.

ÖNEMLİ: Sırtlık açılı olduđundan, "TRiONiC" logosunun dođru şekilde konumlandırıldıđından emin olun.

3 En yukarıya kadar.

İki kelepçeyi en üste itin. Fren kolunu biraz geriye dođru hareket ettirebilmek için üzerindeki vidayı gevřetmeniz gerekebilir.

4 sırtlığı sabitleyin.

4 mm'lik bir allen anahtarıyla, her iki kelepçeyi vidalar ve somunlarla sabitleyin. Sırtlığın kayışları, bağlantı noktasında öne bakmalıdır.

5 Bu fotoğrafta doğru montaj görülmektedir.

Yürütücü açmadan önce.

Yürütücü açmak için sırt dayanağını yukarı doğru açın.

Gerekirse.

Sırt dayanağının çok kısa/çok uzun olduğunu düşünüyorsanız, uzunluğu ayarlayabilirsiniz. İki vidayı ve somunu çıkarın ve ardından sırt dayanağını tekrar monte edin.