



## Trionic Walker Sırt Desteği – Montaj Talimatı



Su itici ve dayanıklı 600D polyesterden yapılmış ergonomik ve dolgulu sırtlık, Walker 9er, 12er ve 14er rollatörlere uyar. Oturduğunuzda rahat ve güvenli bir destek sunar.

Sırt kısmının uzunluğu/derinliği ayarlanabilir.

### ① Vidaları sökün.

İki kelepçeden vidaları ve somunları çıkarın.

### ② Sırtlığı takın.

Kelepçeleri biraz açın ve bunları tutma borularına takın.

**ÖNEMLİ:** Sırtlık açılı olduğundan, "TRIONIC" logosunun doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.



### ③ En yukarıya kadar.

İki kelepçeyi en üste itin. Fren kolunu biraz geriye doğru hareket ettirebilmek için üzerindeki vidayı gevşetmeniz gerekebilir.





④ sırtlığı sabitleyin.

4 mm'lik bir allen anahtarıyla, her iki kelepçeyi vidalar ve somunlarla sabitleyin. Sırtlığın kayışları, bağlantı noktasında öne bakmalıdır.

⑤ Bu fotoğrafta doğru montaj görülmektedir.



Yürüteci açmadan önce.

Yürüteci açmak için sırt dayanağını yukarı doğru açın.

Gerekirse.

Sırt dayanağının çok kısa/çok uzun olduğunu düşünüyorsanız, uzunluğu ayarlayabilirsiniz. İki vidayı ve somunu çıkarın ve ardından sırt dayanağını tekrar monte edin.

