



## Kılavuz: Trionic Walker Sırtlık Kayışının Deęiştirilmesi



① Kayışı tutan vidayı 3 mm'lik alyan anahtarıyla sökün.

Aynı işlemi diğer tarafta da tekrarlayın.



② Vidayı, somunu ve boru ara parçasını kurtardığınızdan emin olun.





## Kılavuz: Trionic Walker Sırtlık Kayışının Deęiştirilmesi



⑤ Yeni yedek kayış dolgunun içine yerleştirin.

ÖNEMLİ: Kayışın ucunun fotoğrafta gösterildiği gibi TRIONIC logosuyla hizalandığından emin olun.



⑥ Boru şeklindeki ara parçayı kayışın ucundaki deliğe yerleştirin.

