



Kılavuz: Trionic Walker Sırtlık Kayışının Deęiřtirilmesi



① Kayıřı tutan vidayı 3 mm'lik alyan anahtarıyla skn.

Aynı iřlemi dięer tarafta da tekrarlayın.



② Vidayı, somunu ve boru ara parasını kurtardıęınızdan emin olun.





Kılavuz: Trionic Walker Sırtlık Kayışının Deęiřtirilmesi



5 Yeni yedek kayıřı dolgunun iine yerleřtirin.

ÖNEMLİ: Kayıřın ucunun fotoęrafta gösterildięi gibi TRIONIC logosuyla hizalandıęından emin olun.



6 Boru řeklindeki ara parayı kayıřın ucundaki delięe yerleřtirin.

